



Ce manuel vous guidera dans le processus à suivre pour vous connecter à Fitbit. Vous aurez besoin d'un compte Google* (adresse e-mail et mot de passe). Si vous n'avez pas de compte Google, veuillez en créer un avant de continuer.

Prenez votre Fitbit et chargez-le d'abord au maximum (100 %). Pour ce faire, connectez le câble d'alimentation fourni à un chargeur et laissez-le charger pendant un certain temps.

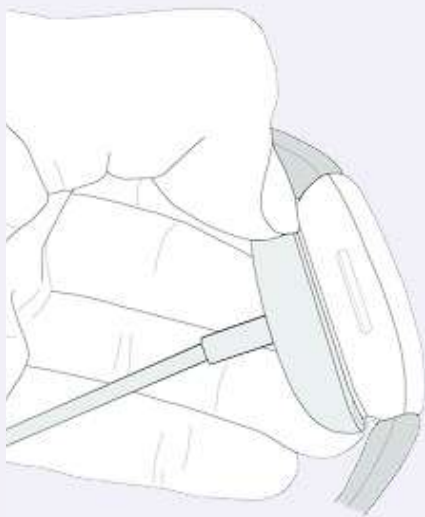


Pendant ce temps, téléchargez l'application Fitbit depuis le Playstore de Apple ou Google et ouvrez-la.


Choisissez "Se connecter avec Google".

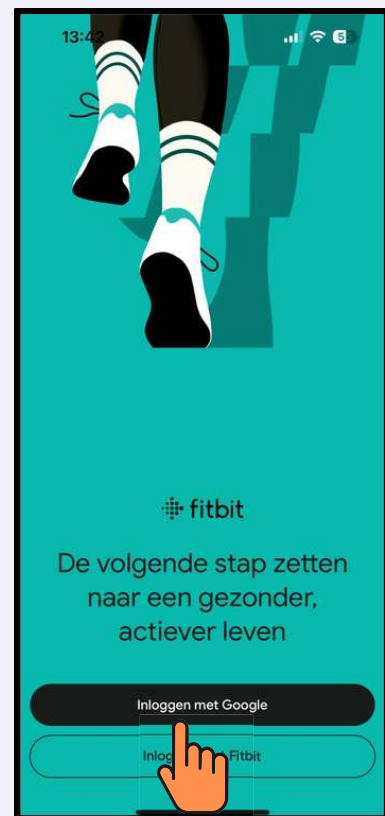

(*) Les personnes disposant d'un ancien compte Fitbit pourront l'utiliser jusqu'au 19 mai 2026 mais doivent transférer leur compte vers un compte Google. Passé ce délai, les comptes non migrés seront supprimés et les données historiques perdues.

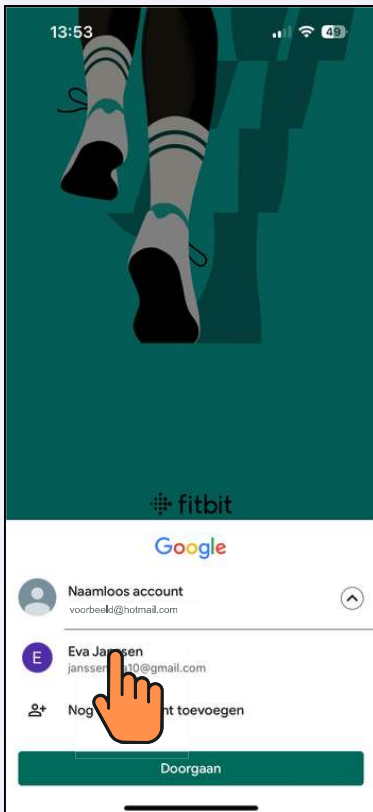

Choisissez le compte Google que vous souhaitez utiliser pour votre Fitbit.

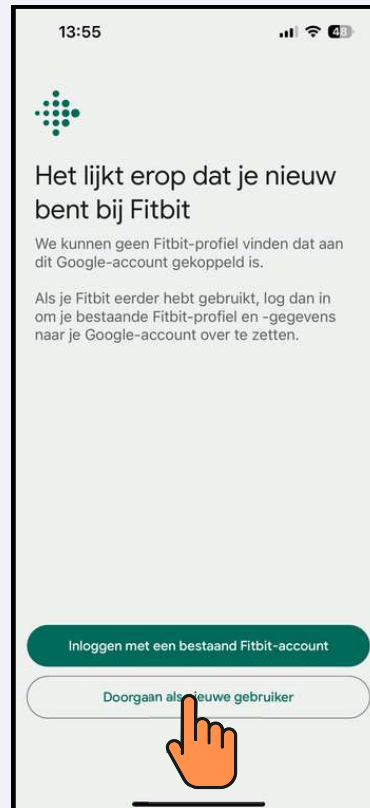


Sélectionnez ensuite "continuer en tant que nouvel utilisateur".



Identifiez-vous à l'aide du mot de passe associé à votre compte Google.




Saisissez votre poids, votre taille et votre sexe. Ces données sont nécessaires pour l'utilisation de Fitbit.

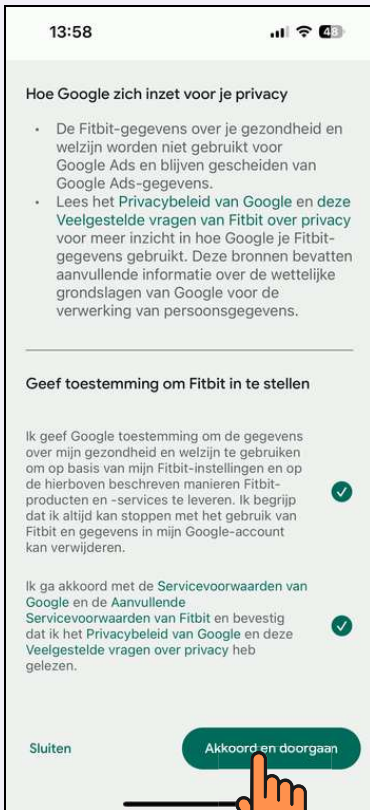


Acceptez les termes et conditions si vous êtes d'accord.



Maintenant, votre compte Google est lié à votre compte Fitbit.

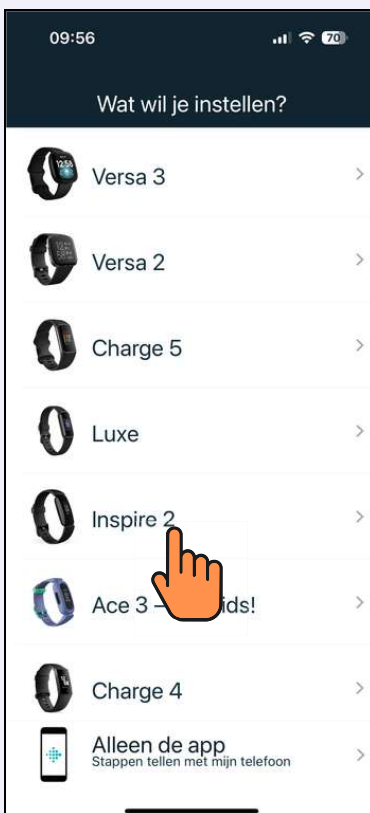


Le système vous demande de relier votre Fitbit à votre nouveau compte. Choisissez ici votre type de Fitbit, p.ex. ici il s'agit de l'Inspire2.

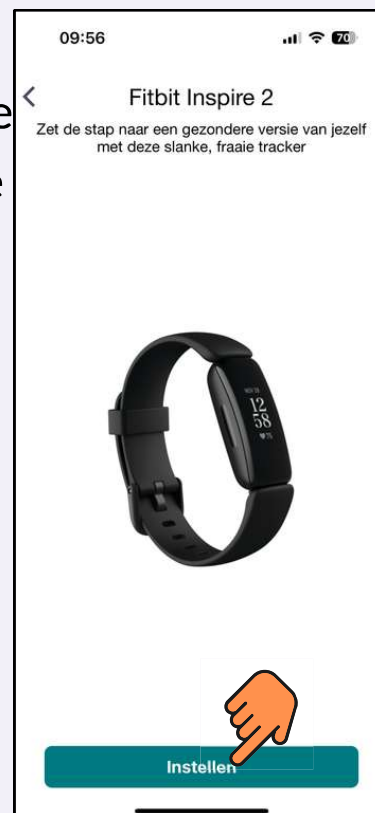

Choisissez "Configurer".



L'application cherche alors votre Fitbit via Bluetooth. Dès que votre Fitbit été trouvé, un code s'affiche sur l'écran de celui-ci.

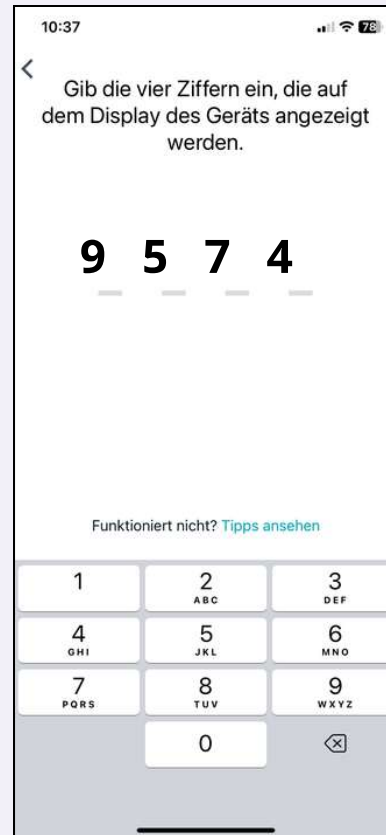

Saisissez ce code dans l'application.

Votre Fitbit est maintenant lié à votre application et à votre compte Fitbit !

Félicitations! Votre Fitbit est prêt!

L'étape suivante est de télécharger l'application Mindstretch et de vous connecter avec le même compte Google.

Remarque : nous vous recommandons de faire synchroniser automatiquement votre Fitbit avec l'application Fitbit. Cela permettra à Mindstretch de collecter les données sans intervention manuelle. Vous pouvez installer la synchronisation automatique en Android et iOS (Apple) à partir des paramètres de votre téléphone.